

# Rollstuhllift Notbedienung zum Reinschwenken des Lifts

Im Falle zb. fehlender Stromversorgung hebt sich der Lift nicht ins Fahrzeug. Mit der Notbedienung kann dieser manuell hineingehoben und damit die Autotüre geschlossen werden.



1 Verkleidung im Kofferraum demontieren, dafür Knopf drehen.



2 Verriegelung (in unmittelbarer Nähe des Radhauses) öffnen.



3 Sicherung beim Einzugmotor lösen (hinter der Kofferraumverkleidung).



4 Lift schwenken (dabei nach oben und hinten schieben)